



1 Prieš atikdami testą nusiplaukite rankas



2 Išimkite testą kaselėje iš sandaraus folijos maišelio ir panaudokite per vieną valandą

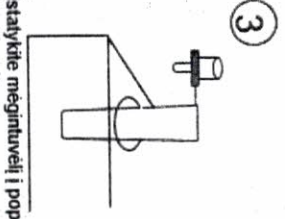


3 Įstatykite mėgintuvėlį į popierinį dantistai

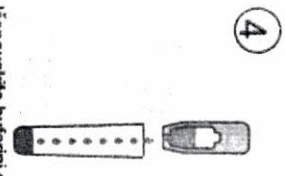


4 Išspauskite buferinį skystį į mėgintuvėlį neliečiant mėgintuvėlio sienelę




5 Švelniai įkiškite tamponą į vieną šnervę 2-4cm (vaikams 1-2cm)

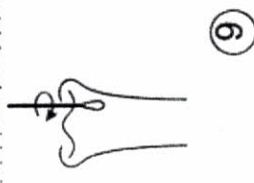


6 Švelniais sukamaisiais judesiais patrinkite tamponą aplink vidinę šnervės sienelę 5 kartus maždaug 7-10 sekundžių

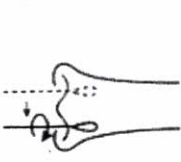


7 Pakartokite tą patį procesą su tuo pačiu tamponu kitoje šnervėje

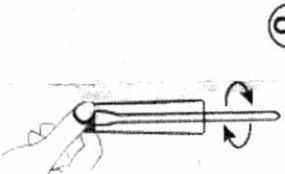


8

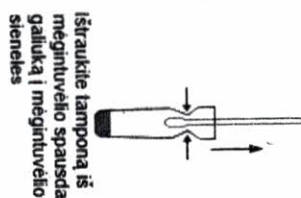


9 Ištraukite tamponą iš mėgintuvėlio spausdami galutką į mėgintuvėlio sienelę

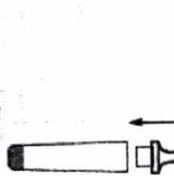

10 Sandariai uždėkite lašintuvo antgalį ant mėgintuvėlio

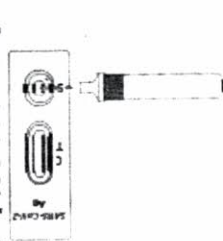


11 Įlašinkite mėginio 2-3 lašus į testą kaselės mėginio duobutę ir patieskite laikmatį

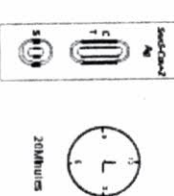


12 Tyrimo rezultatus vertinkite 20 minučių begyje. Praėjus 30 minučių po mėginio įlašinimo, tyrimo rezultatų vertinti nebegalima

13

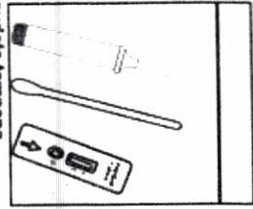


13 Panaudotą tamponą, reagentus, testą kaselę išmeskite į pateiktą atliekų maišėlį

14

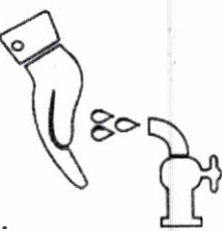


14 Atlikę testą nusiplaukite rankas


Rezultatų interpretavimas

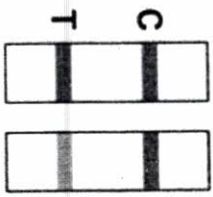

Teigiamas

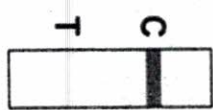

Neigiamas

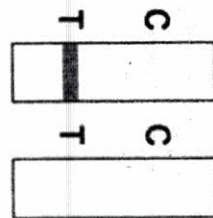

Nevertinamas

Prašau perskaitykite informacinį testo lapelį, kuriame pateiktos aiškios testo atlikimo instrukcijos. Tiksliai laikykitės testo atlikimo procedūros, nes tai gali daryti įtaką testo rezultatams

Testo atlikimo instrukcija